


マモールド

上下マルチフェイスシールド

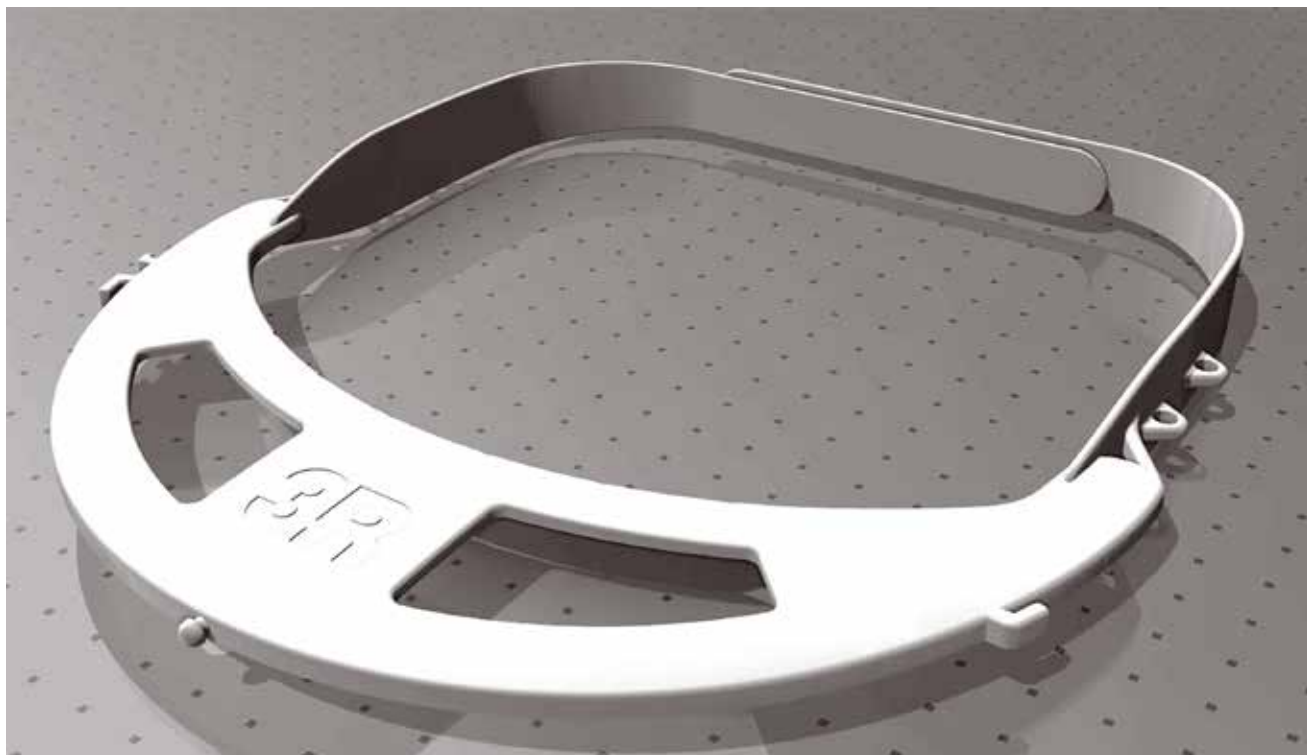

付属品

- ① シールド 2枚
- ② 耳掛けヒモ 2本

※万一、足りないものがございましたら、弊社サポートセンターにご連絡ください。
※デザイン及び仕様については、改良のため予告なしに変更する場合があります。
※本書に記載している商品名、サービス名等は各社の登録商標です。

使用方法

【シールドの準備】

シールド両面の、保護シートをはがす

シールドの両面には、輸送中のキズを防止するための薄い保護シートが貼られています。はがした後、シールドの折り目を伸ばしてください。


保護シートをはがさずにご使用になると、視界不良の原因になります。

【フレームに取り付け】

フレームのツメを、シールドの穴にはめる

下図の数字の順番に従って、穴にツメをはめてください。


シールドを取り外すときは、逆の順番に外してください。

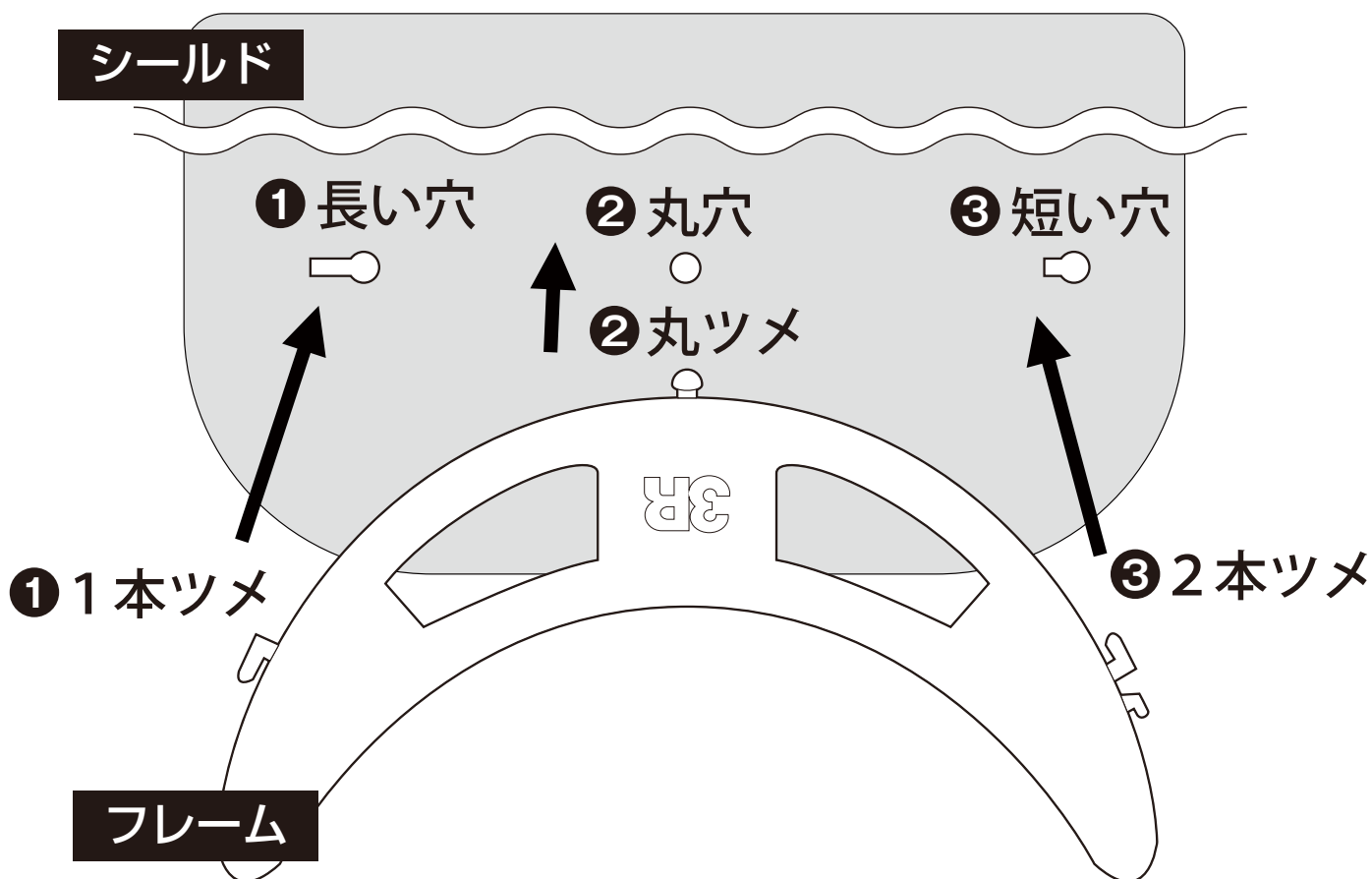

【調整して装着する】

頭もしくは首に装着する

フレームの大きさを調整するためのボタンと穴が、フレーム後部にあります。頭や首から落下しないように、フレームの大きさを調整してください。

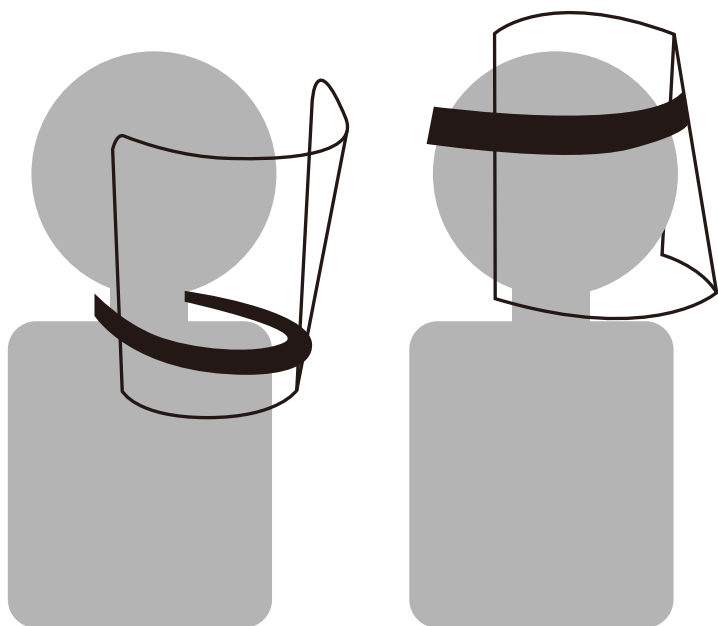

首に装着

頭に装着

耳掛けヒモで 安定性アップ



フレームの両側に、ヒモ通し穴があります。付属のヒモを通し、好みの大きさの輪を作って、それを耳にかけることが可能です。



動画で説明いたします

シールドの取付方法を、動画でも説明いたします。

お手持ちのスマートフォンでQRコードを読み取るか、下記URLにアクセスしてください。

<https://youtu.be/thjHwWnns64>

使用上のご注意

- 製品を強く折り曲げないでください。破損の恐れがあります。
- 火気の近くで使用しないでください。変形の恐れがあります。
- 飛沫対策シールドとしての用途以外に使用しないでください。
- 全ての飛沫を防ぐものではありませんのでご注意ください。

サポートおよび企業情報

製品保証：初期不良のみ

製品に関するお問い合わせ先

下記お問い合わせ窓口もしくは販売店へお問い合わせ下さい。



product-support@3rrr-hd.jp

 092-260-3033

FAX 092-260-8506

※受付時間：平日 9:30 ~ 17:30



スリー・アールシステム株式会社

3R SYSTEMS CORP. JAPAN

〒812-0008 福岡市博多区東光2丁目8-30-2階